

Unsere fortschrittlichste Art, Milch abzupumpen

Für einen komfortablen, schnelleren Milchfluss



Effektive Kombination aus Saugen und Stimulation der Brustwarze durch sanfte Massagebewegungen für einen schnelleren Milchfluss.



Passt sich dank der peristaltischen Bewegung des Silikonkissens an jede Brustwarze an, für mehr Komfort



Das leichte und kompakte Design hilft Müttern, überall leicht und flexibel abpumpen zu können.

Nachgewiesene Wirksamkeit²

Philips Avent führte eine klinische Studie² mit stillenden Müttern durch, bei der die neue elektrische Milchpumpe von Philips Avent verwendet wurde. Unter 50 Sekunden: Die Zeit bis zum Milchspendereflex wurde mit der elektrischen Milchpumpe von Philips Avent signifikant reduziert.³

Wie Mütter die Verwendung der Philips Avent Milchpumpe bewerten:

- Gesamtwirksamkeit: 96,5%
- Komfort: 93%
- Saugleistung: 92%

Stetige Unterstützung für Sie und junge Eltern

Wir bieten Ihnen und Ihren Eltern eine Reihe von Infomaterialien, um Müttern zu helfen, selbstbewusst und unbeschwert abzupumpen

Unterstützung für Mütter

Entdecken Sie unsere Vielzahl an Broschüren, Artikel und Leitfäden für Eltern zum Thema Säuglingsernährung, um diese in den ersten Jahren zu unterstützen.

Unterstützung für Sie

Erfahren Sie mehr über die neuesten Lösungen und Forschungsergebnisse zur Säuglingsernährung mit unserem Angebot an Expertenvorträgen, Artikeln, Studien und Produktdemonstrationen.

Das Still-Support-Set für Mütter

Entdecken Sie unser komplettes Sortiment an Philips Avent Stillprodukten, das Müttern dabei hilft, so lange zu stillen, wie sie es möchten.

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Entdecken Sie unser Support Material auf www.philips.de/hebammen



Quellen:

- 1 <https://abm.memberclicks.net/assets/DOCUMENTS/PROTOCOLS/26-persistent-pain-protocol-english.pdf>
- 2 Basierend auf einer klinischen Produktstudie (n=40), die 2019 in den Niederlanden durchgeführt wurde, im Vergleich zu den Ergebnissen der vorherigen Produktversion. Weitere Informationen finden Sie unter www.philips.de/avent.
- 3 48,6 Sekunden Zeit bis zur MER durch eine elektrische Doppel-Milchpumpe.



PHILIPS

AVENT

Medizinisches
Fachpersonal

Unsere erste Milchpumpe,
die sich der Mutter
anpasst und den Milchfluss
natürlich anregt

Die Bedürfnisse von Müttern im Mittelpunkt

Egal, ob Mütter ausschließlich oder in Kombination mit der Flasche stillen, wir unterstützen sie dabei, mit Zuversicht und Leichtigkeit so lange zu stillen, wie sie es möchten

Deshalb haben wir uns intensiv mit den Bedürfnissen von Müttern auseinandergesetzt und über 30 Jahre Forschung genutzt, um unsere erste Milchpumpe zu entwickeln, die sich an die Mutter anpasst und die Brustwarze wie ein Baby stimuliert.



Effektivität

Ein schnell einsetzender Milchspendereflex und ein optimaler Milchfluss geben Müttern die Sicherheit, genug Milch für ihr Baby zu produzieren.

Eine Pumpe, die die Milch in einer ähnlichen Bewegung wie beim Trinken meines Babys abpumpt



Komfort

Eine weiche Brusthaube, die gut passt, und ein sanftes Vakuum geben Müttern eine komfortable, positive Erfahrung beim Abpumpen.

Die Brusthauben sollten flexibel und weich sein

Brüste und Brustwarzen gibt es in allen Formen und Größen

Wir haben die Brustwarzen von stillenden Frauen untersucht und festgestellt, dass sich die Größe der Brustwarzen während des Stillens und des Abpumpens stetig ändert, was es für die Mutter schwierig macht, die richtige Größe der Brusthaube zu finden.


Durch die Verwendung der richtigen Größe kann die Mutter mehr Komfort während des Abpumpens erfahren.¹

Unser physiologisch-orientierter Innovationsansatz

Wir glauben, dass Babys von Natur aus die Besten sind, wenn es darum geht, die Brustwarze zu stimulieren und die Brust zu entleeren

Unsere Untersuchungen zeigen, dass Säuglinge eine Kombination aus Brustwarzen-Stimulation durch Massagebewegung und Saugen verwenden, um Milch effektiv zu extrahieren.

Die natürliche Trinkbewegung des Babys

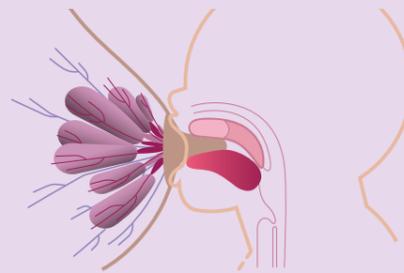


1

Das Baby dockt an der Brustwarze an.



2

Das Baby kombiniert Saugen mit einer peristaltischen Bewegung, wobei es die Brustwarze gegen den Gaumen drückt und sie stimuliert.

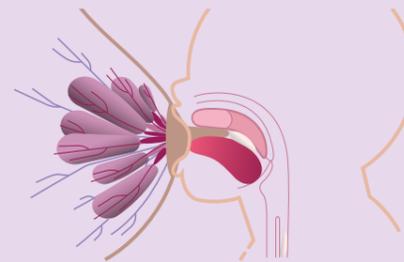

3

Diese natürliche Trinkbewegung regt den optimalsten Milchfluss an.


Effektive Kombination aus Saugen und Stimulation

Vorstellung der Natural Motion-Technologie

Unsere Erkenntnisse über die Physiologie des Stillens waren die Grundlage für unsere neue und zugleich fortschrittlichste Milchpumpe.


Inspiziert von der einzigartigen Kombination aus Saug- und Massagebewegungen des Babys, regt die Natural Motion-Technologie den Milchfluss natürlich an.

Die Natural Motion-Technologie der Milchpumpe

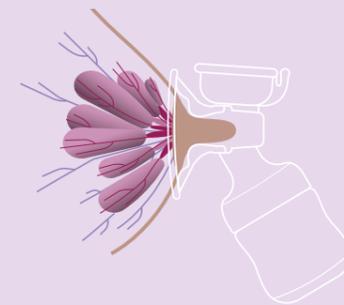

1

Das einteilige, weiche Silikonkissen legt sich sanft und flexibel an die Brustwarze an.

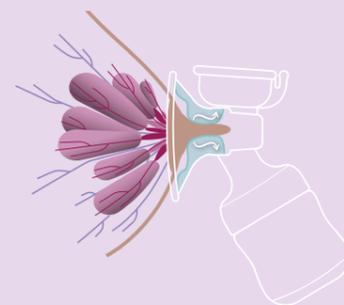

2

Die Pumpe kombiniert Saugen mit einer peristaltischen Bewegung, wobei die Brustwarze mittels sanfter Massagebewegung stimuliert wird.



3

Diese Natural Motion-Technologie regt einen schnellen Milchfluss an.

Ein Silikonkissen für 99,98% aller Brustwarzengrößen*



Die Natural Motion-Technologie ermöglicht es Müttern, sich während der gesamten Stillzeit sicherer und wohler zu fühlen. Die peristaltische Bewegung des einteiligen Silikonkissens führt dazu, dass es sich flexibel und sanft an die sich stetig verändernde Brustwarze anpasst, für 99,98% aller Brustwarzengrößen.

*Bis zu 30mm