

PHILIPS

Klinische
Atemwegstherapie

Respironics AF541

Maskenwechsel




Durch den **regelmäßigen Wechsel des Maskentyps** können Druckpunkte verändert werden, was für Entlastung sorgt und die Gefahr von Hautläsionen reduziert


Ausführliche Informationen erhalten Sie vom Philips Vertriebsteam.

Richtiges Anlegen und Einstellen der Maske


Anlegen des **Oro-Nasal-Kissens** („OTN“, „Over the Nose cushion“) mit CapStrap Maskenhalterung

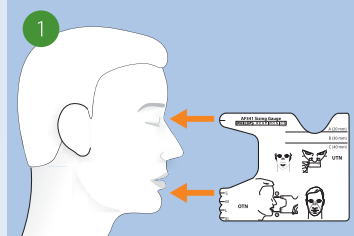


- 1
- Mit der Größenschablone das passende OTN-Kissen identifizieren.
 - Bei leicht geöffnetem Mund des Patienten den gezackten Teil der Schablone zwischen Lippe und Kinn platzieren, um die richtige Größe zu ermitteln.

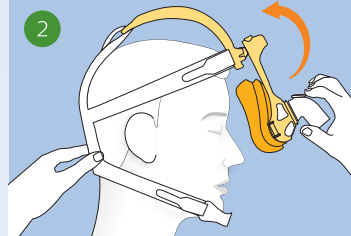


- 2
- Das Kissen in den Maskenrahmen einsetzen, diesen an der CapStrap Maskenhalterung anbringen und auf dem Kopf des Patienten platzieren.
 - Die Maske vom Gesicht anheben und die Maskenhalterung auf dem Kopf des Patienten platzieren.

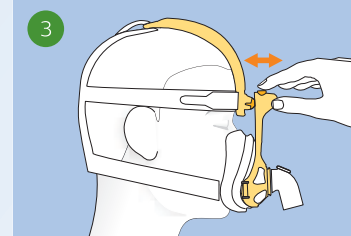


- 3
- Die Maske nach unten führen, so dass Nase und Mund des Patienten abgedeckt sind.
 - Die Taste am Maskenrahmen gedrückt halten, um die Distanz zwischen Gesicht und Maske zu verändern und dadurch Leckagen einzustellen und maximalen Komfort zu erreichen.

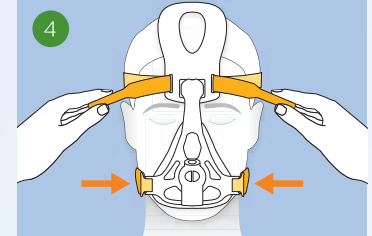


- 4
- Die Hakenclips an der Maske anbringen.
 - Vor den Patienten stellen und beide oberen Maskenhalterungsbänder gleichzeitig einstellen.
 - Den Vorgang für die unteren Bänder wiederholen.
 - Dann das Scheitelband auf der Rückseite einstellen.

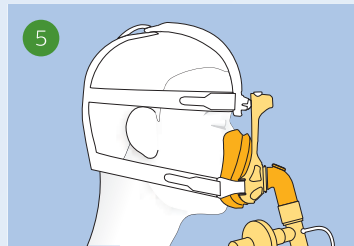


- 5
- Die Maske mit dem Einweg-Ausatemventil (DEP) des Schlauchsystems verbinden.

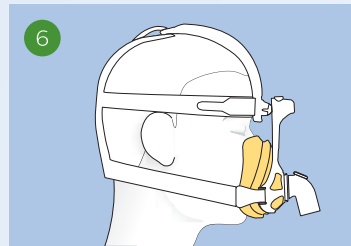

- 6
- Darauf achten, dass die Maske bequem auf dem Gesicht aufliegt.
 - Die Unterseite des Kissens sollte unmittelbar über dem Kinn liegen, wenn der Patient den Mund leicht geöffnet hat.

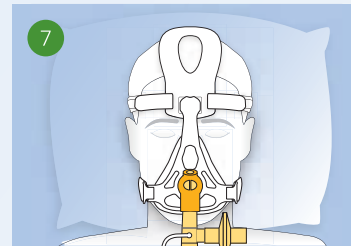


- 7
- Die nichtinvasive Beatmung mit dem Patienten in 45°-Schräglage fortsetzen und den Patienten anweisen, normal zu atmen.

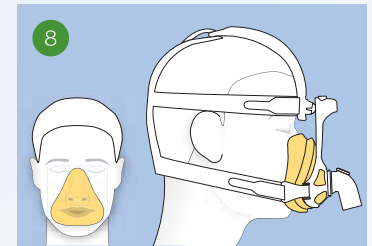


- 8
- Den Patienten regelmäßig auf Hautreizungen untersuchen.
 - Stets den Komfort des Patienten im Auge behalten.


Anlegen des **Unter-Nasal-Kissens** („UTN“, „Under the Nose cushion“) mit CapStrap Maskenhalterung

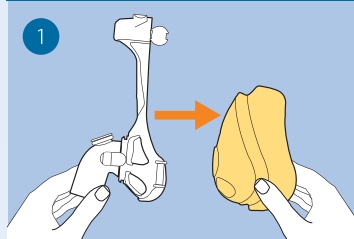


- 1
- Das OTN-Kissen an den Seiten greifen.
 - Das Kissen aus dem Maskenrahmen entnehmen.
 - Zur späteren Verwendung in die CleanClip Schale legen.

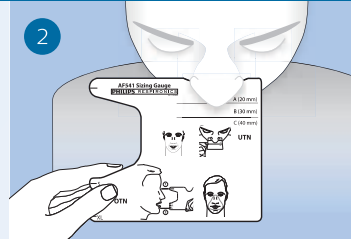

- 2
- Mit der Größenschablone das passende UTN-Kissen identifizieren.

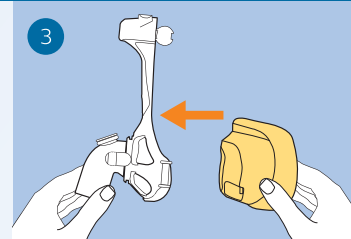

- 3
- Das UTN-Kissen an den Seiten greifen und in den Maskenrahmen einsetzen.
 - Zum Anlegen des UTN-Kissens die Schritte 2 – 8 oben befolgen.

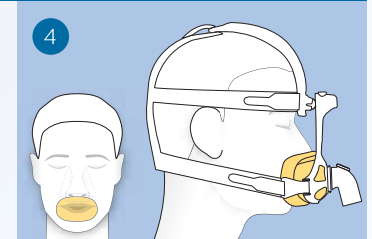

- 4
- Daran denken, dass die Unterseite des Kissens unmittelbar über dem Kinn liegen sollte, wenn der Mund leicht geöffnet ist.
 - Das Kissen sollte unterhalb der Nase des Patienten liegen (nie oberhalb der Nase des Patienten).