

Reinigung und Desinfektion Ihres Philips CT- und PET/CT-Systems

Hinweis: Bitte entnehmen Sie weitere Informationen Ihrer CT- oder PET/CT-Gebrauchsanweisung und/oder dem Technischen Benutzerhandbuch



Anleitung

- Reinigung bedeutet das Entfernen sichtbarer Verunreinigungen (zum Beispiel durch organisches oder anorganisches Material) von Objekten und Oberflächen. Dies erfolgt normalerweise manuell oder mechanisch mithilfe von Wasser mit Reinigungsmitteln oder enzymatischen Produkten. Eine gründliche Reinigung vor dem Desinfizieren ist unerlässlich, da anorganische und organische Materialien, die auf Instrumentenoberflächen verbleiben, die Effektivität dieser Prozesse beeinträchtigen können.
- Für die Desinfektion sollten Empfehlungen für leichte bis mittlere Desinfektionsstufen gemäß der Definition der CDC befolgt werden (<https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/>). Die Oberflächen des Systems sind nicht kritische Oberflächen und werden mit leichten bis mittelstarken Desinfektionsmitteln desinfiziert.
- Verwenden Sie ein handelsübliches Desinfektionsmittel, das von der entsprechenden Behörde zu diesem Zweck zugelassen ist, um die Oberfläche des Systems, einschließlich Konsole, Gantry, Tisch und Zubehör, zu reinigen.

Die folgenden Materialien können zur Reinigung und Desinfektion verwendet werden:

- Sprühreiniger oder Wischtücher, die 1:10 Bleiche entsprechen
- Leichte bis mittelstarke desinfizierende Entkeimungstücher oder -flüssigkeit
- 3% Wasserstoffperoxid
- Ethanol
- Erdölgase, verflüssigt, gewaschen
- Quaternäre Ammoniumverbindungen
- Benzyl-C12-18-Alkyldimethyl
- Salze mit 1,2-Benzoisothiazol-3(2H)-on-1,1-Dioxid (1:1)
- Destilliertes Wasser
- Brennspritus
- Lösung aus Bleiche und Wasser oder Desinfektionstücher mit einem Verhältnis von bis zu 1:10

Blut und Kontrastmittel stellen Gesundheitsrisiken dar. Treffen Sie angemessene Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie Blut oder Kontrastmittelreste entfernen.

- Vor der Reinigung der vorderen und hinteren Scannerabdeckung müssen die Mikrofone abgedeckt werden, um ein Eindringen der Reinigungslösung ins Innere zu vermeiden.
- Achten Sie bei der Reinigung der Tasten und der Innenseite der Gantry-Öffnung darauf, dass keine Reinigungslösung ins Innere gelangt.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel oder organische Lösungen für die Reinigung des Systems. Starke Reinigungsmittel, Alkohol und organische Reiniger können die Oberfläche beschädigen und die Struktur schwächen.

Haftungsbeschränkungen

Philips hat sorgfältig auf die Genauigkeit dieser Informationen geachtet. Philips übernimmt jedoch keine Haftung für Fehler oder Auslassungen und behält sich das Recht vor, Änderungen an den hier aufgeführten Produkten ohne Vorankündigung vorzunehmen, um Zuverlässigkeit, Funktionalität oder Design zu verbessern. Philips kann jederzeit Verbesserungen oder Änderungen an dem/den in diesem Inhalt beschriebenen Produkt/en oder Programm/en vornehmen.

Nur zu Lehrzwecken

Philips stellt diese Materialien nur für Lehrzwecke zur Verfügung. Der Inhalt ist nicht dazu gedacht, medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung zu bieten. Dieser Inhalt sollte nicht als Ersatz für das Technische Benutzerhandbuch oder die Gebrauchsanweisung betrachtet werden.

Bevor Sie versuchen, jegliche medizinischen Geräte von Philips zu verwenden, lesen Sie sorgfältig die Gebrauchsanleitung und achten Sie dabei besonders auf alle darin enthaltenen Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Hinweise. In sämtlichen Fällen gelten die in der Gebrauchsanweisung enthaltenen Informationen als Leitrichtlinien.

Nutzungsbedingungen

Bitte beachten Sie die vollständigen Nutzungsbedingungen: philips.de/a-w/nutzungsbedingungen.html