




# Kurzanleitung

- 1 Übersicht
- 2 Aufbau des Atemschlauchsystems
- 3 Bildschirm einrichten
- 4 Therapie einrichten

# 1

# Übersicht

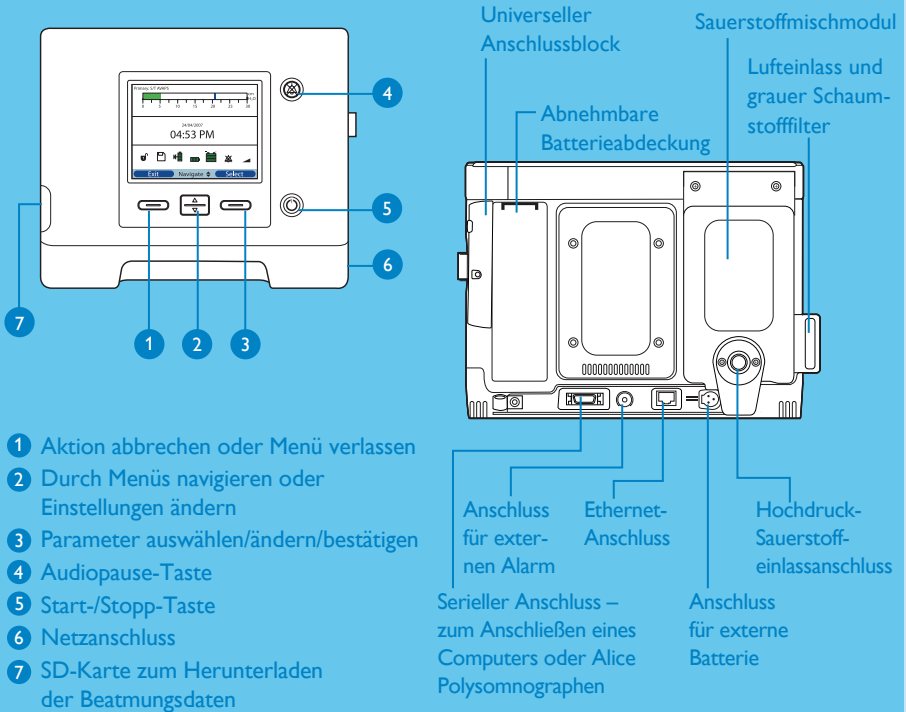

## Symbole und Piktogramme



Modus Voller Zugriff



SD-Karte in das Beatmungsgerät eingeführt



Audiopause aktiviert



Rampe aktiviert



Status des optionalen abnehmbaren Akkus



Status der internen Batterie



Status der externen Batterie




Batterie lädt

# 2

## Aufbau des Atemschlauchsystems


Vor der Inbetriebnahme des Trilogy202 Geräts müssen Sie den Schlauchsystemtyp konfigurieren.

### Schlauchsystem für passives Ausatemventil

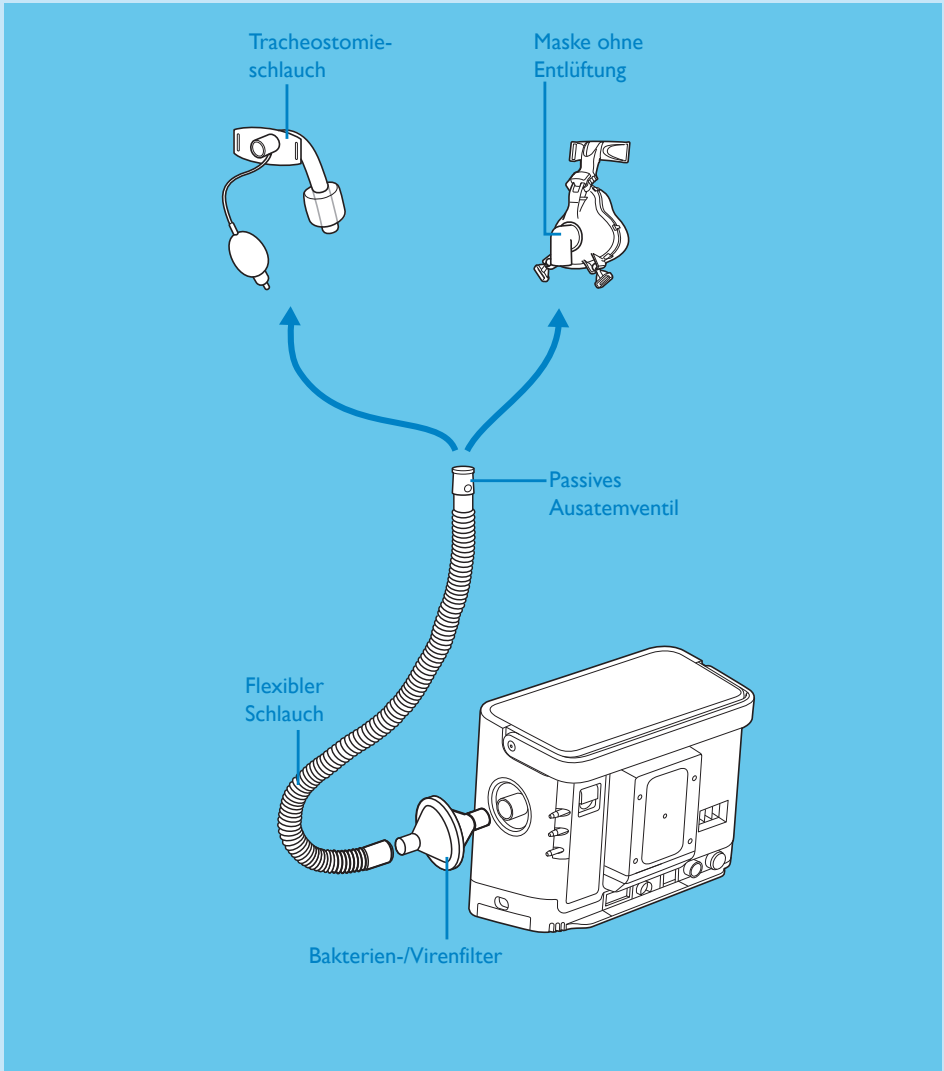


Vom Setup-Bildschirm „Passiv“ für den Schlauchsystemtyp wählen.

# Schlauchsystem mit aktivem Ausatemventil und proximalem Atemwegsdruck

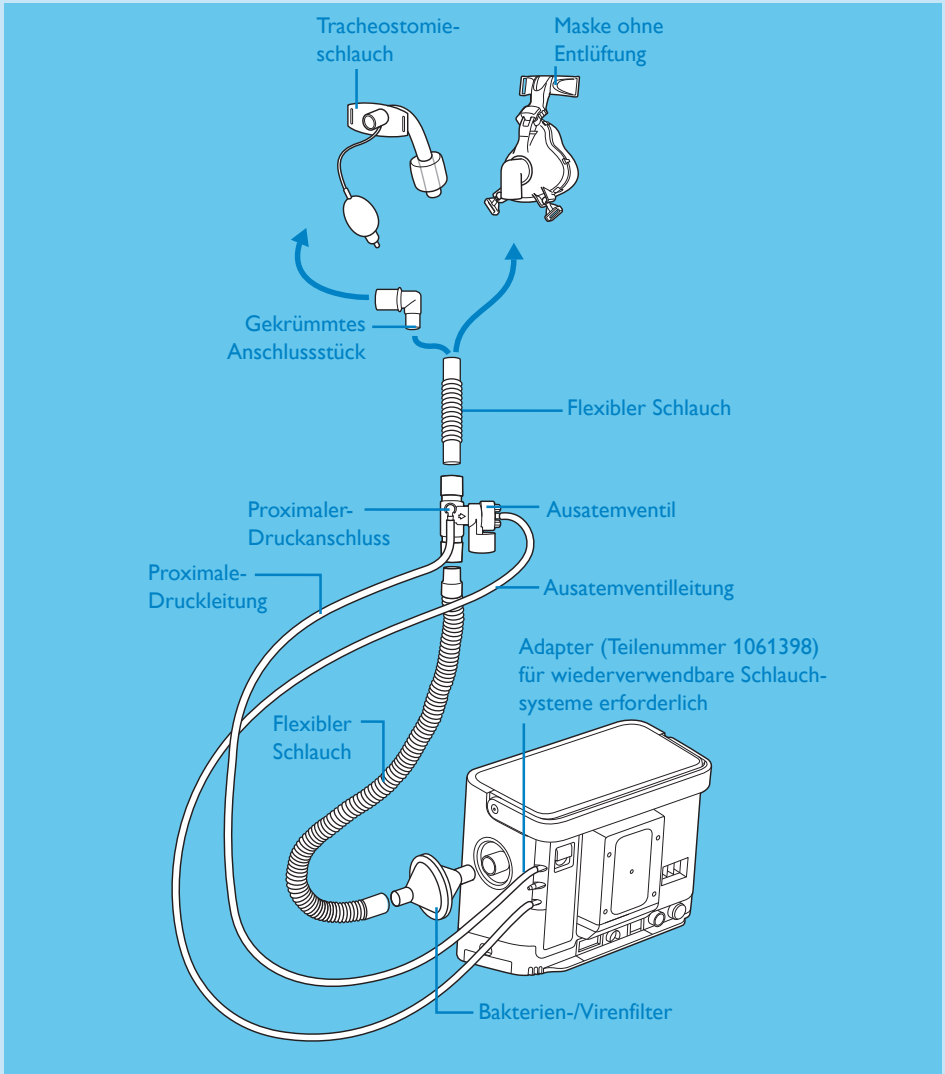

Vom Setup-Bildschirm „Aktiv-PAP“ für den Schlauchsystemtyp wählen.

# Schlauchsystem für aktives Ausatemventil mit Flowsensor

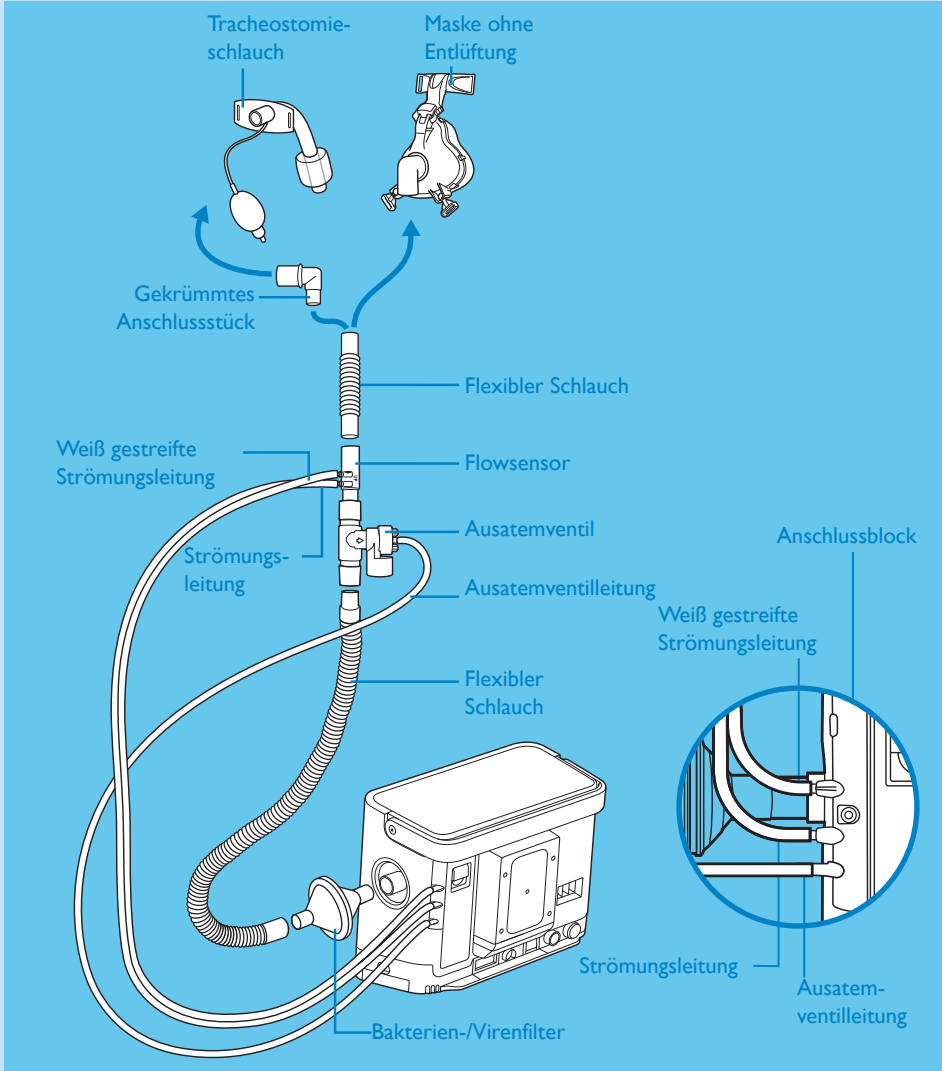


Vom Setup-Bildschirm „Aktivfluss“ für den Schlauchsystemtyp wählen.

# 3


## Bildschirm einrichten

Konfiguration des Schlauchsystemtyps (aktiv oder passiv)


Sicherstellen, dass das Trilogy 202 ausgeschaltet ist, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.

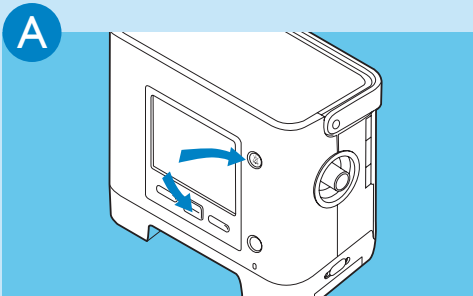


☒ und ein paar Sekunden drücken und halten, um den **Setup** Bildschirm aufzurufen

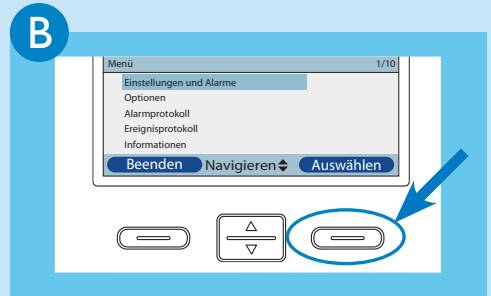

Ändern **Einstellungen und Alarme**

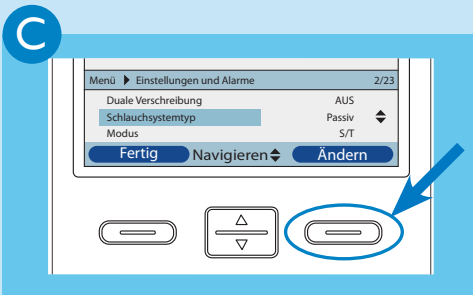


Zum **Schlauchsystemtyp** navigieren und **Ändern** drücken

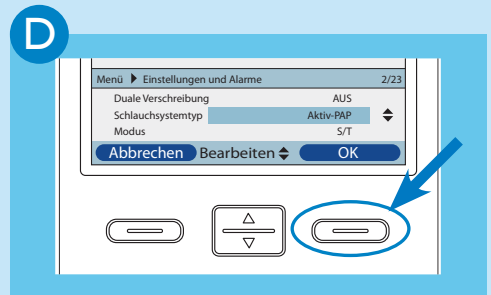


verwenden, um **Aktiv-PAP**, **Aktivfluss** oder **Passiv** zu wählen, und dann zum Bestätigen zweimal **OK**

Menüzugriff einstellen (kann unabhängig davon ausgeführt werden, ob der Patient angeschlossen ist oder nicht)


### Vollen Zugriff auf die Einstellungen aktivieren

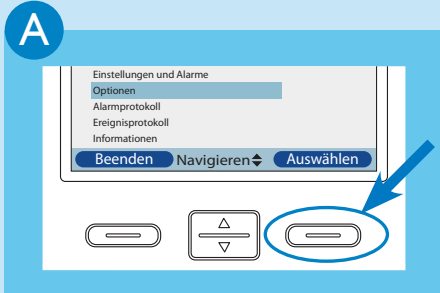


Zu den **Optionen** navigieren und **Auswählen** drücken

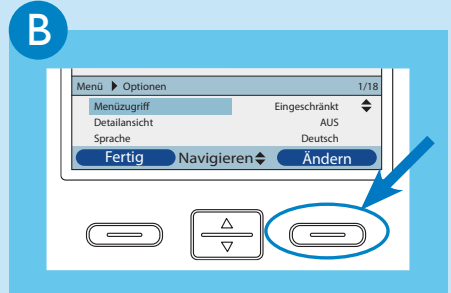


**Ändern** drücken, um **Menüzugriff** aufzurufen

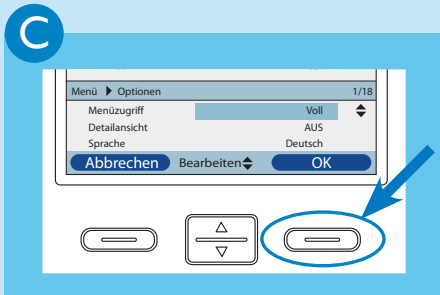

den **Rechts**-Pfeil verwenden, um **Voller Zugriff** oder **Eingeschränkter Zugriff** auszuwählen, und zum Bestätigen **OK** drücken

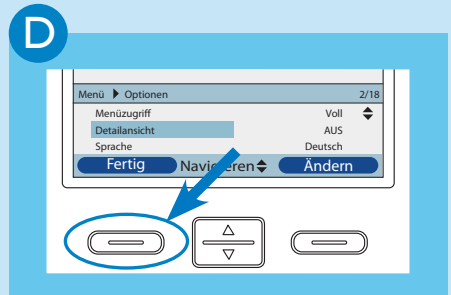


**Fertig** und **Beenden** drücken, um zum **Startbildschirm zurückzukehren**

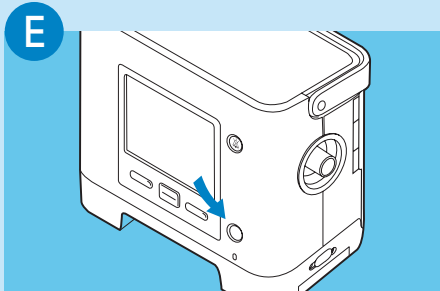


den **Power**-Button drücken, um mit der Therapie zu beginnen **oder** weiter durch das Menü zu navigieren, um die Beatmungsparameter einzustellen.

# 4


# Therapie einrichten

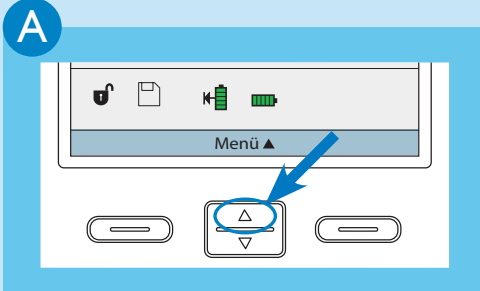


Vom Hauptbildschirm aus **Menü** drücken

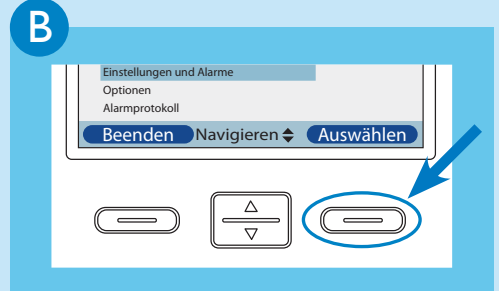

**Einstellungen und Alarme** auswählen

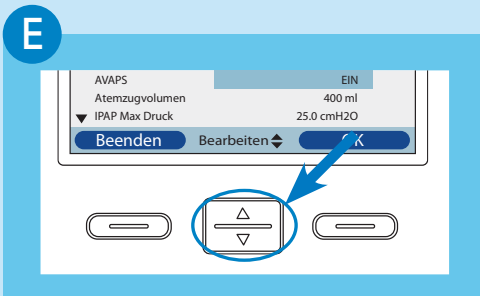


verwenden, um den Wert oder Status der Einstellung zu ändern

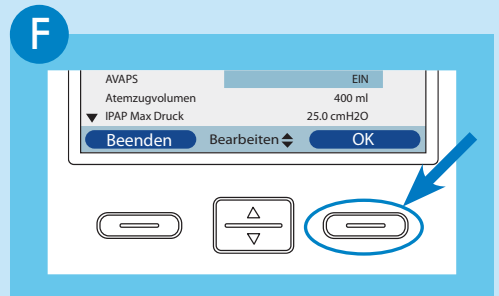


**OK** drücken, um die neue Einstellung zu validieren

## Duale Verschreibung

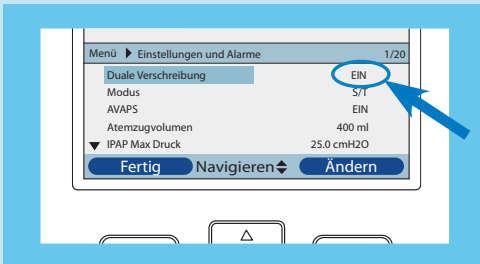



Wenn **Duale Verschreibung** aktiviert ist, müssen beide Therapien wie zuvor erläutert eingestellt werden

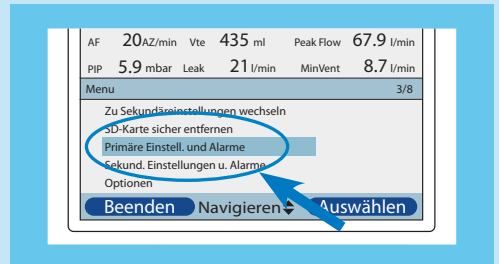


Primäre und sekundäre Therapie einstellen

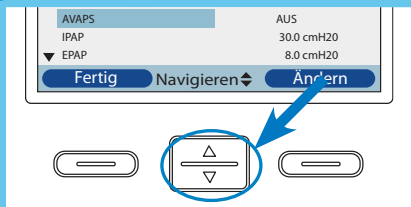


**C**

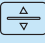Mithilfe der Taste  nach oben und nach unten durch die Einstellungen und Alarme navigieren

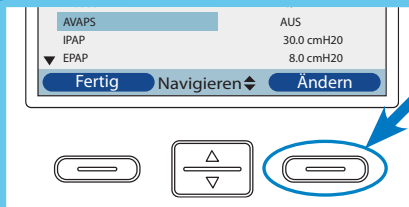**D**

**Ändern** drücken, um den blau markierten Parameter zu ändern

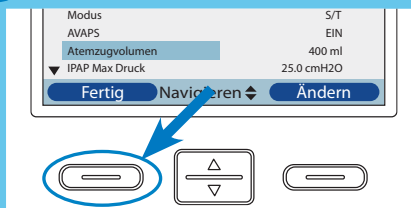**G**

**Fertig** und **Beenden** drücken, um zum Hauptbildschirm zurückzukehren

Respironics Inc.  
1001 Murry Ridge Lane  
Murrysville, PA 15668 USA



Respironics Deutschland  
Gewerbestr. 17  
82211 Herrsching, Deutschland



1071334  
DSF 7/20/10  
German